




エレナージュ for Pro II

サロン価格	お問合せください
外形寸法	約W275×D217×H114(mm)
重量	約1.5kg(本体のみ)
電源	DC12V 2.0A
消費電力	約5W
付属品	本体、電極シート(5枚)、5又コード(1本)、 延長コード(5本)、コードクリップ(1個)、 ACアダプター、取扱説明書
生産国	日本
保証期間	1年



Elenage for Pro II

 公式オンラインショップはこちら

ヤーマンプロ オンライン 検索

<https://pro.ya-man.com/>



製造元

ヤーマン株式会社

東京都江東区東陽2-4-2 新宮ビル

TEL : 03-5665-1177 (受付時間 平日9:00~17:00)

FAX : 03-5665-8752

MAIL: professional@ya-man.com

WEB : <https://ymn.cm/pro>



全身深層*エレナージュ

エレナージュ for Pro II

*……角質層まで

業務用機器

Made in Japan

大人気業務用EMS機器がより使いやすくなり新発売!

圧倒的な体感、エレナージュ for Pro II

エレナージュ for Proは、直流電流によって肩から足先まで直接電気信号を与え刺激。

低い周波数から高い周波数を搭載した複合エレナージュ波により、全身の筋肉にアプローチします。



5Hz ~ 100kHzの直流電流が、表層から深部まで全身を刺激

電極シートを敷いて電源を入れ、ヤーマン独自の波形で刺激。全身をスッキリリフレッシュ。

ヒートマットや遠赤外線ドームを敷いてお使いいただくとともに効果を発揮。一般的に体温が上がると基礎代謝がアップすると言われてるので、併用が最もおすすめの使い方。

上半身だけ、下半身だけ等、部分使いもOK、スッキリしたい部分に当ててお使いいただけます。



ヒートマットとの併用

遠赤外線ドームとの併用



推奨ジェル

メソスタイルジェル

プレミアム

500g



体感をよりアップさせるために、電極シートに水溶性のジェルを塗り、温めてから使用するのがおすすめです。

延長コード



付属の延長コードを活用すれば、どんなサロン様でもお使いいただけます。他の機器との併用も安心です。

10種類のモードと19段階のレベル調整でオーダーメイドのトリートメントが実現!

エレナージュ for Pro IIは、お客様の体調やご要望に合わせて10種類のモードから選択でき、さらに各シート(0番以外)ごとのレベル調整を可能としました。オーダーメイドの施術でお客様により満足度の高いコース提供が叫びます。

モード	ケア内容詳細	出力シート
1 全身のドレナージュ	全身の筋肉を同時に刺激	すべての電極
2 スペシャルドレナージュ	全身の筋肉をより強力に、同時に刺激	すべての電極
3 時系列ドレナージュ	全身の筋肉をより強力に、部位ごとに刺激	4~1 順次出力移動
4 下半身のドレナージュ	腰から下の筋肉を集中刺激	0、3、4のみ出力
5 上半身のドレナージュ	背中から腹部の筋肉を集中刺激	0、1、2のみ出力
6 全身のトレーニング	全身の筋肉を同時にトレーニング	すべての電極
7 スペシャルトレーニング	全身の筋肉をより強力に、同時にトレーニング	すべての電極
8 時系列トレーニング	全身の筋肉をより強力に、部位ごとにトレーニング	4~1 順次出力移動
9 下半身のトレーニング	腰から下の筋肉を集中トレーニング	0、3、4のみ出力
10 上半身のトレーニング	背中から腹部の筋肉を集中トレーニング	0、1、2のみ出力

※ドレナージュモード→トレーニングモードの順での使用がおすすめです。

ドレナージュモード
筋肉をもみ出すような刺激を与えます。

トレーニングモード
選んだモードに合わせてケアしたい部分に電極シートを通してEMS刺激が伝わります。



部位別ケアも可能!

電極シートは身体に巻き付けても、下に敷いても使用可能な為、部分ケアにも最適です。



腹部ケア 電極シートの金属部分がケアしたい部分に直接触れるように巻き付けます。



脚部ケア モード選択で下半身のケアを選択してお使いいただける他、脚の下に硬めのものを敷き、電極シートをより密着するように、身体の曲線に合わせて床面と身体との隙間にタオルなどを丸めて入れると、より体感を得られます。