

まっすぐ、輝きの源へ

Luminous Lift for Salon

ルミナスリフト for Salon


販路限定品

価格 ¥85,800 (税込)



3 MODES


CLEAN
3分

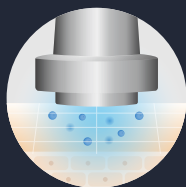

RF
ION
BLUE LED
VIBRATION

RF(ラジオ波)で肌を温めながらイオンの力で洗顔では取り切れない汚れをオフ。青色LEDによるフォトケアも同時に行います。


MOIST
6分

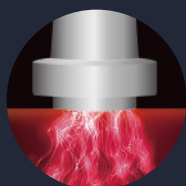

RF
メラノバリアパルス
DYHP
EMS
RED LED
VIBRATION

RF(ラジオ波)で温め、メラノバリアパルスでアプローチ。美白化粧品^{※1}との併用で明るさに満ちた肌を目指します。同時にヤーマン史上最高^{※2}の導入技術DYHPで角質層の深部や筋肉にまでダイナミックにアプローチ。さらに低～高周波EMSで筋肉を刺激し土台ケアも。赤色LEDによるフォトケアも同時に行います。

COOL
3分

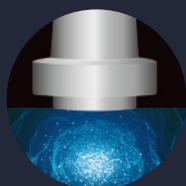

COOL
BLUE LED

肌をクールダウンしながら、青色LEDのフォトケア。肌を引き締めて、フェイシャルケアを仕上げます。

FEATURES



浸透技術 01

DYHP / ダイナミックハイパーパルス

角質層の深部まで浸透して肌をケアし、筋肉にもダイナミックにアプローチ。

浸透技術 02

メラノバリアパルス / 新導入波形^{※1}

MOISTモードに搭載されている新導入波形。

RF(ラジオ波)で温めながらのケアで肌にアプローチ。

ビタミンC誘導体やトラネキサム酸など、美白成分^{※2}を含んだ化粧品との併用がおすすめ。


おすすめ美白成分^{※2}

ビタミンC誘導体、アルブチン、
ビタミンC、トラネキサム酸、
コウジ酸、ハイドロキノン

おすすめの保湿成分

グリセリン、BG、アスタキサンチン、イソフラボン、スクワラン、
トレハロース、ビタミンA(レチノール)、ビタミンB3(ナイアシナミド)、
ビタミンE(トコフェロール)、尿素、PG、Bカロチン

美白成分^{※2}(トラネキサム酸、ビタミンC誘導体)の浸透^{※3}検証

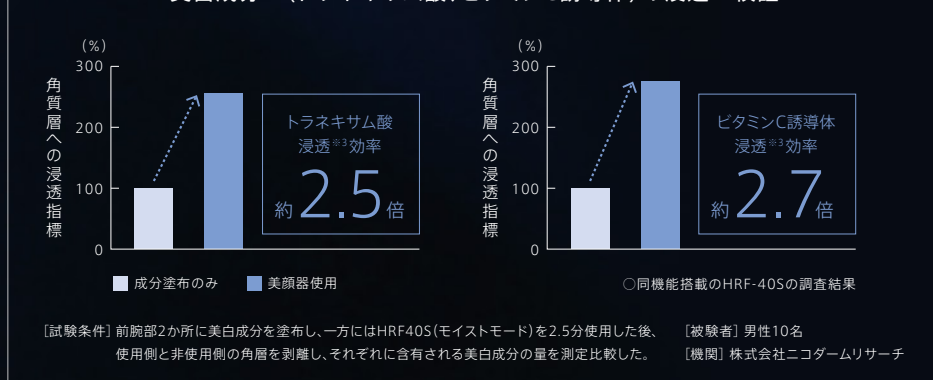

特許構造の二重リング電極^{※4}

サークルRFリフトテクノロジー / 独自構造RF

1MHzのRFで広く、深く^{※3}、均一に肌へ熱を届けます。

肌を引き上げるように機器を使うことで、効率的に美しく。肌深部^{※3}まで温めてエイジングケア^{※5}。

RECOMMENDATION

スキンケア成分を贅沢に配合

推奨化粧品

ナノリフトセラム

内容量:100ml

定価 16,500円(税込)

肌悩みにアプローチする、厳選した有用成分を贅沢に配合。
様々なエイジングサインのお手入れに。

スキンケア成分

[FGF] 肌にハリ・弾力を与える [ヒト型セラミド] 4種のセラミド配合 肌を保護し整える うるおい成分 [ビタミンC誘導体] イオン導入に効果的な整肌成分 [アルブチン] くすみ^{※6}のないクリアな肌へ うるおい成分 [ペプチド] うるおい成分 [アボカドタンパク] 厳選されたアボカドから生まれた天然由来の機能性ペプチド うるおい成分

*ブランド・パッケージが変更になりました *内容量・成分に変更はございません *美顔器に同梱されている商品は、パッケージが異なる場合がございます



※1 MOISTモードのみに搭載 ※2 メラニンの生成を抑え、シミ・そばかすを防ぐ ※3 角質層まで ※4 特許取得番号:6212608号 ※5 年齢に応じたケア ※6 乾燥による

HOW TO USE

使い方動画はこちらからチェック



修理・交換のお問い合わせ

固定電話から 0120-776-282 携帯電話から 0570-550-637

受付時間:9~17時(土日祝日・年末年始除く)

付属品購入のお問い合わせはお電話から



WEBからのお問い合わせはこちら