

for BODY & FACE

Made in JAPAN

V・I対応

NEW 販路限定品

品名 レイボーテ Rフラッシュ
ハイパー for Salon
型番 PSM-100B



最大照射回数	約90万発 ^{※1}
ボディケア回数	約1130回分(最大)に相当 ^{※2}
電源	交流式
海外・国内使用	○ 100~240V
本体質量	約470g(ローラーヘッド装着時)
仕様	本体サイズ: 約W228×D78×H63(mm)(ローラーヘッド装着時) 定格電源: DC 12V / 5A 消費電力: 約7.0W(待機時/瞬間最大約60W) 付属品: ACアダプター、ローラーヘッド、LEDヘッド、VIヘッド、クールヘッド

※1 ローラーヘッド、LEDヘッド、VIヘッドの合計値(シングルモードレベル1使用)
※2 ローラーヘッド(レベル1)で算出 フェイス、ビキニライン含まず 個人差があります

レベル ローラーモード:5段階 シングルFACEモード:5段階
シングルBODYモード:5段階

PROFESSIONAL
YAMAN

全身を、素早く美しく



販路限定品 PHOTO BEAUTY 光美容器

レイボーテ R フラッシュ ハイパー for Salon

Rei Beauté R Flash Hyper for Salon

ケア管理アプリ

アプリ運動(iOS)でお手入れが
もっと便利に



①App Storeでアプリを検索し、
ダウンロードする
「Rei Beaute」を検索してください。
アプリが使用できるようになると、アイコンが
追加されます。

②アプリを開き、画面の指示に従う
本製品とのペアリングなど、
初期設定を行ってから使用します。

■次のお手入れときをお知らせ
■ローラーの最適な操作速度がわかる
「スピードトレーニング機能」で
照射ムラを低減
■ローラーヘッドの交換時期をお知らせ
※Androidには対応しておりません。

販売店

製造元

ヤーマン株式会社

〒135-0045 東京都江東区古石場1-4-4

商品に対する詳しいご説明・お問い合わせは下記URLまたはヤーマンコールセンターまで
※付属品購入のお問い合わせはお電話にて承ります

【ヤーマンコールセンター】受付9:00~17:00(土・日・祝日・年末年始除く)

☎ 0120-776-282 (通話料無料)

携帯電話・PHSからは 0570-550-637

<https://ymn.cm/pro>

ご購入前に、商品パッケージまたは商品カタログで「安全に関するご注意」をご確認ください。
ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みのうえ正しくお使いください。
印刷物と実物では多少色味が異なる場合があります。あらかじめご了承ください。
この商品の詳細については、販売店または当社におたずねください。

このカタログの記載内容は2021年3月現在のものです。

PRO-RBH-2021-1

YAMAN
PROFESSIONAL
公式サイト






ヤーマンの特殊技術 レイボーテフラッシュとは？

光美容 580nm付近の波長って？

光には色々な種類があります。よく知られている紫外線は、お肌にダメージを与える光。お肌に良い影響を与えるのは可視光線です。その中でもヤーマンは580nmに着目。

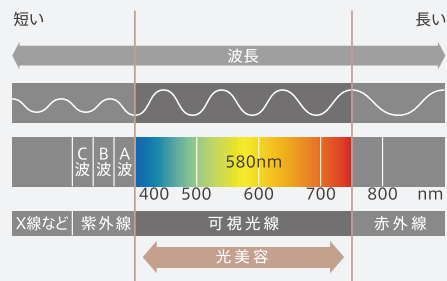

使い続けることでなめらか肌に
4週間使ってみました※2

ムダ毛が目立ちにくい



高機能モデル+LEDヘッド+VIヘッド+クールヘッド

LEDヘッド搭載で速攻うるすべ肌

光美容器

レイボーテ Rフラッシュ ハイパー for Salon

PSM-100B

フラッシュ
レベル
★★★★

ムダ毛

うるおい

スポット
ケア

V・Iライン

腕・脇・足

フェイス

ヒゲ

胸毛

AC100-240V

海外・国内OK

家族で使える

レベル
5段階

FACE

レベル
5段階

BODY

肌色センサー

Made in JAPAN



パワー
約84%^{※1}
UP

1ヶ月使用で
実感!

満足度
約93%^{※2}

長寿命ランプ
約90万発^{※3}

ボディケア回数 最大約1130回分^{※4}

R フラッシュシリーズ 開発者のこだわり

ストレスのないムダ毛ケアをお届けするために
試作を重ね、最速約0.2秒の高速フラッシュを実現

ストレスなく効率よく短時間でムダ毛ケアできる技術を開発しようと考えました。照射時間の限界に挑戦し、20回以上の試作を繰り返して約0.2秒の照射間隔を実現[※]。さらに、手軽かつスムーズにケアできるようにローラーを組み合わせました。

※ ローラーモードレベル1使用



ヤーマン
開発本部 山崎 謙太郎

※1 STA-197Bとの比較 ※2 回答者:女性15名 効果には個人差があります 個人の主観的な感想です

※3 ローラーヘッド、LEDヘッド、VIヘッドの合計値(シングルモードレベル1使用) ※4 ローラーモード(レベル1)で算出 フェイス、V・Iライン含まず 個人差があります

for Salonモデルは付属ヘッドが豊富！

**紫色LED for Salon限定LEDヘッドを搭載**

紫色LEDは、エステサロンでも人気のケア。
これまで光エステ美顔器を数多く開発してきたヤーマンだから
実現できた、美顔器としても使えるムダ毛ケア美容器です。
LEDのみ照射して、お肌のケアも可能です。



LEDヘッド

VIヘッド デリケートゾーン※1も安心！

ローラーヘッド・LEDヘッドに加え「VIヘッド」が搭載。
V・Iラインは他の部位に比べて効果が実感できるまでに時間か
かることもあるので、自宅で継続しやすい点もポイントです。



VIヘッド

クールヘッド クールヘッドで毛穴が目立たない肌に

ムダ毛ケア→クールダウンというサロンのようなケアを可能に
するクールヘッドがつきました。
よりお肌のケアにこだわりながら、毛穴が目立たないつるすべ肌
を目指していただけます。
メイク前のクールダウンなどとしてもおすすめです。



クールヘッド

doctor's voice

光には様々な種類があり、波長(色)により到達範囲に違いがあります。
LEDやレーザーは単一波長(単色)で集中的に出力し、ピンポイントに
効果を発揮するのに対して、光美容器は複数の波長(色)を同時に出力し
ており、広い範囲に効果を発揮することができるため、顔から体まで全身
のお肌の悩みにおすすめできます。どちらも併用することがお勧めです。

※ 上記は個人の感想です。効果効能を保证するものではありません。



わたなべ皮膚科院長
渡邊 莊子 先生

SPEED & POWER ローラータイプ

SPEEDのひみつ

広い照射面 | **9.24cm²**

ローラーを滑らせるだけで
かかってない※1スピードケア


お肌の上を転がりながら移動距離を自動で
感知する「ローラー連射機能」を搭載。
照射もれやオーバーケアを抑えながら、照射
間隔約0.2秒※2の圧倒的なスピードで全身を
ケアできます。

POWERのひみつ

ハイパワー | **ダブル W(2本)ランプ**

気になる太い毛やヒゲも
しっかりケア

ワイドな照射面にフラッシュを発するキセノン
ランプをダブル(2本)で搭載。
より効率的なムダ毛ケアが可能です。

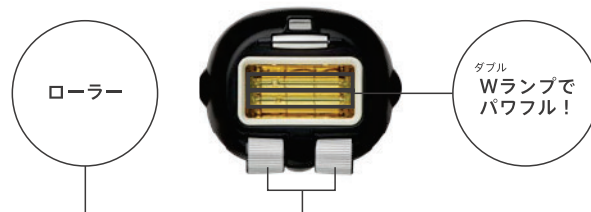

フェイス



約13秒

両脇



約6秒

両腕



約21秒

両足



約19秒


V・Iライン



肌色センサー

肌色センサーで最適レベルを自動調整

オートモードでは、お肌の色濃度を
センサーで読み取り、最適な光レベ
ルを5段階で自動調整します。

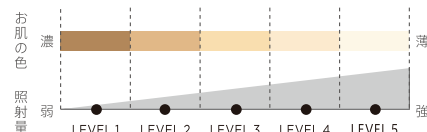

※1 レイポーター Rフラッシュシリーズにおいて ※2 ローラーモードレベル1使用時

ムダ毛ケアに関するよくあるご質問

Q&A

HOW TO USE

部位に合わせてモードの切替可能

ローラーモード

ローラー
ヘッド

1. グリップを水平にし、ローラーモードにします。
2. お肌の上を滑らせるように動かすことで、フラッシュが最大7発連続照射されます。

○連続照射（最大7発）するごとに、数秒のチャージ時間があります



〈オススメの使用部位〉

腕 足

シングルモード

ローラー
ヘッドLED
ヘッド

VIヘッド

1. グリップを倒してシングルモードにします。
2. 照射ボタンを押して、位置を移動させながら1発ずつ照射します。


○1発照射するごとに、数秒のチャージ時間があります



〈オススメの使用部位〉

脇 フェイス V-Iライン
ヒゲ 胸毛

クールモード

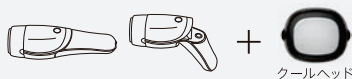

クールヘッド

1. クールヘッドを装着し、電源を入れるとクールモードになります。
2. フラッシュをあてたお肌に少しずつずらしながらあてていきます。

○グリップは水平、倒す、どちらでも使用できます



〈オススメの使用部位〉

脇 フェイス V-Iライン
ヒゲ 胸毛

Q1 お手入れの頻度は？

- A 最初の2ヶ月は2週間に1回程度（フェイスクアは週2～3回程度）、3ヶ月目以降は4～8週間に1回程度を目安に行ってください。

※同じ部位に1日5分以上、フラッシュを照射しないでください。

※同じ部分に1日2回以上、フラッシュを照射しないでください。

※効果の感じ方は使用する部位や個人によって異なります。

※本商品は永久脱毛をするものではありません。

Q2 照射レベルの選び方は？

- A 温かさ、少し熱さを感じる程度のレベルに設定してご使用ください。
痛みを感じるようなレベルでは使用しないでください。使用部位によってレベルを調整してください。
「オートモード」を使用すると、その部位の肌色をセンサーが読み取り、自動的にお肌に合わせた照射レベルでお手入れを行うことができます。

Q3 使用後のお手入れは？

- A お手入れ後は、化粧水などで照射したお肌を保湿してください。

Q4 お手入れが続けられるか心配です。

- A ケア管理アプリをダウンロードすると、忘れがちな次のお手入れのタイミングをスマートフォンからお知らせします。

※Androidは現在是对応していません。

※STA-205L・STA-206Pの機能です。



Q5 ランプ交換不要ですか？

- A 照射回数が多くランプ交換せず長期間使用できます。（2つのヘッドを合わせて最大約90万発^{※1}の照射が可能。ボディケア回数：最大約1130回に相当^{※2}）。ランプ交換が必要になった際もコールセンターで替えヘッドをご購入いただけます。

※1 ローラーヘッド、LEDヘッド、VIヘッドの合計値（シングルモードレベル1使用） ※2 ローラーヘッド（レベル1）で算出